



N Á V O D K P O U Ž I T Í
R U K A V I C E
A M B U L E X V I N Y L
P u d r o v a n é /
N e p u d r o v a n é
NESTERILNÍ RUKAVICE

Vinylové rukavice z polyvinylchloridu, nesterilní, pudrované nebo nepudrované.
Neobsahují latex. Jednorázový výrobek pro lékařské použití.
Stupeň ochrany před riziky platí pouze pro nový výrobek.

CHARAKTERISTIKA

Jednorázové rukavice uplatněním ve zdravotnictví tam, kde je nízké riziko vzniku infekce – bez přítomnosti tělních tekutin, krve a chemických látek.

NÁVOD K POUŽITÍ

Tyto rukavice chrání před mechanickými a chemickými hrozbami podle vyznačených úrovní ochrany.

Před použitím je vždy nutné rukavice zkontrolovat, zda nejsou mechanicky poškozeny, např. nejsou proděravělé nebo roztržené. V případě pochybností tyto rukavice nepoužívejte a použijte nový pár. Před nasazením rukavic se doporučuje precizně osušit pokožku rukou. Pokaždé po sundání rukavic se doporučuje ruce důkladně umýt, osušit a natřít krémem pro péči o pokožku. Používejte min. 1 pár rukavic na jednoho pacienta a na jeden zákrok. Rukavice kontaminované krví nebo tělními tekutinami by měly být likvidovány jako zdravotnický odpad. Pokud se kůže dostane do kontaktu s nějakou chemickou látkou, je třeba ji okamžitě omýt velkým množstvím vody a mýdla. Dávejte pozor, aby chemikálie neprošly přes manžetu rukavice. Nepoužívejte rukavice, pokud jsou uvnitř špinavé - mohou způsobit podráždění nebo infekce, které způsobují dermatitidu nebo vážnější onemocnění. Nepoužívejte v případě přecitlivělosti na látky rukavice osahující. V případě alergické reakce okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

BALENÍ A PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Rukavice jsou baleny v jednotlivých krabicích po 100 kusech. Krabice s rukavicemi jsou zabaleny v kartonových krabicích určených pro přepravu a skladování. Rukavice by měly být skladovány při teplotě 10 °C až 30 °C v původním obalu, na suchém a tmavém místě. Uchovávejte je mimo dosah tepla, vlhkosti, silného světla a ozónu.

Výrobce:

TZMO S.A.
Żółkiewskiego 20/26 87-100
Toruń / Polsko
www.tzmo-global.com

Distributor pro ČR:

TZMO Czech Republic s. r. o.
Vlastibořská 2789/2
Praha 9
www.tzmo.cz

Poslední aktualizace:

05 / 2021



TZMO
Czech Republic
member of TZMO GROUP

s.r.o.

TRVANLIVOST

Při správném skladování si rukavice zachovávají fyzikální vlastnosti po dobu tří let od výroby. Datum výroby a expirace jsou uvedeny na obalu.

LIKVIDACE

Použité rukavice by měly být likvidovány v souladu s platnými předpisy pro tento materiál. Rukavice znečištěné chemickými látkami je třeba likvidovat v souladu s předpisy pro příslušné chemické látky.

ZÁVĚR

Poškozený výrobek by měl být okamžitě zlikvidován, protože neposkytuje ochranu deklarovanou výrobcem a jeho používání může být rizikové.